



Philips Codemaster

20 ms Impulsweite


Maximale Schrittdauer

Empfohlene maximale Schrittdauer für HeartSync-Elektroden (in Stunden)

	Schrittrate (ppm)															
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
Impuls Amplitude (mA)	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	30	24	24	24	24	24	23	20	16	16	14	12	10	8	8	8
	40	24	24	24	22	22	18	18	16	14	14	10	10	8	8	8
	50	24	24	22	20	18	16	16	12	12	10	10	8	8	6	6
	60	24	22	20	18	16	14	14	11	10	9	8	6	5	5	5
	70	24	23	20	17	15	14	12	11	9	8	6	5	5	4	4
	80	22	21	20	17	14	13	12	11	8	7	5	4	4	4	3
	90	20	20	18	16	14	13	11	9	8	6	4	4	3	3	2
	100	18	18	17	16	13	12	10	9	7	5	4	4	3	3	2
	110	18	17	16	15	12	10	9	8	6	4	4	3	3	3	2
	120	16	16	15	13	11	10	8	8	5	4	3	3	2	2	1
	130	14	14	13	11	10	9	8	7	5	4	3	2	2	2	1
	140	12	12	11	10	9	8	7	6	4	4	3	2	2	2	1
	150	11	10	8	6	6	5	5	4	4	3	2	2	2	2	1
	160	10	8	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1
	170	8	8	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
	180	8	7	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Darf nicht ohne Genehmigung von Nissha Medical Technologies reproduziert werden

Bitte kontaktieren Sie für Fragen bezüglich der Elektrodenkompatibilität Nissha Medical Technologies unter +44 1803 860100 oder
HS.Info@NisshaMedical.com
DESales@NisshaMedical.com

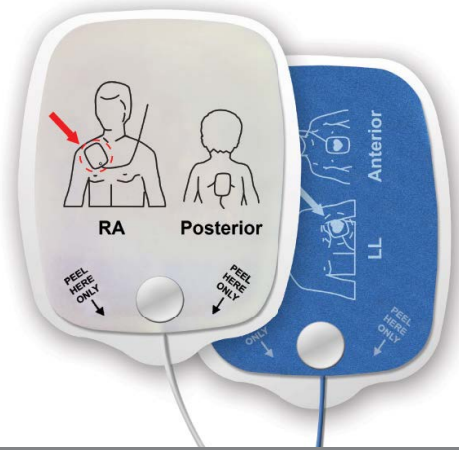

Philips HeartStart MRx

Monitor/Defibrillator/Schrittmacher – 40 ms Impulsweite

Maximale Schrittdauer

Empfohlene maximale Schrittdauer für HeartSync-Elektroden (in Stunden)

	Schrittrate (ppm)																
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
Impuls Amplitude (mA)	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	30	24	24	22	20	16	14	12	10	8	8	7	6	6	5	5	4
	40	22	16	14	12	10	8	8	6	6	7	6	5	4	4	4	3
	50	20	15	14	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2
	60	16	14	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	2	2	2
	70	14	12	10	10	8	6	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2
	80	12	10	9	9	8	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2
	90	10	9	8	8	6	4	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1
	100	9	8	7	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1
	110	8	7	6	6	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1
	120	8	6	6	5	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
	130	7	5	5	5	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	140	6	5	4	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	150	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	160	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Darf nicht ohne Genehmigung von Nissha Medical Technologies reproduziert werden

Bitte kontaktieren Sie für Fragen bezüglich der Elektrodenkompatibilität Nissha Medical Technologies unter +44 1803 860100 oder
HS.Info@NisshaMedical.com
DESales@NisshaMedical.com