



# Zoll

40 ms Impulsweite

## Maximale Schrittdauer

### Empfohlene maximale Schrittdauer für HeartSync-Elektroden (in Stunden)

		Schrittrate (ppm)															
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Impuls Amplitude (mA)	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	30	24	24	22	20	16	14	12	10	8	8	7	6	6	5	5	4
	40	22	16	14	12	10	8	8	6	6	7	6	5	4	4	4	3
	50	20	15	14	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2
	60	16	14	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	2	2	2
	70	14	12	10	10	8	6	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2
	80	12	10	9	9	8	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2
	90	10	9	8	8	6	4	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1
	100	9	8	7	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1
	110	8	7	6	6	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1
	120	8	6	6	5	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
	130	7	5	5	5	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	140	6	5	4	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Darf nicht ohne Genehmigung von Nissha Medical Technologies reproduziert werden

Bitte kontaktieren Sie für Fragen bezüglich der Elektrodenkompatibilität Nissha Medical Technologies unter +44 1803 860100 oder [HS.Info@NisshaMedical.com](mailto:HS.Info@NisshaMedical.com) oder [DESales@NisshaMedical.com](mailto:DESales@NisshaMedical.com)